

FICHA TECNICA
PORTATUBO CON EXPULSOR DE AGUJA



DESCRIPCION:

Cartucho individual de polipropileno que permite asegurar la agujas para la extracción de sangre. Dispone de un mecanismo de liberación está diseñado para retraerse automáticamente.



LIMPIEZA

Cuando una inspección del Speedy antes o después del uso indique una contaminación visible, proceda con lo siguiente:

Para fines de limpieza, sumerja el soporte en una solución desinfectante (por ejemplo, alcohol isopropílico) recomendada para instrumentos médicos, de acuerdo con las pautas de la solución.

INDICACIONES DE USO

1. Enhebre la aguja (en el sentido de las agujas del reloj) en el soporte. (a) Asegúrese de que la aguja esté firmemente asentada en el soporte
2. No gire demasiado la aguja ya que esto puede provocar que se afloje durante la recolección!
3. Asegúrese de que la posición de la aguja sea completamente recta. Si no está recto, no hay garantía de que la aguja permanezca firme en el soporte.
4. Proceder con la venopunción
5. Sostenga el Portatubo verticalmente cerca de un recipiente para objetos punzocortantes con la punta de la aguja apuntando hacia abajo
6. Después de la punción venosa, la aguja se libera del soporte presionando el mecanismo de liberación de color Azul, para que la aguja caiga directamente en un recipiente para desechar objetos punzantes.

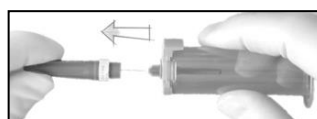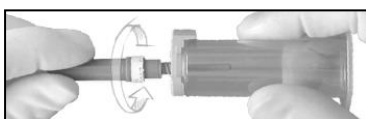

NOTA:

Debido a la función de resorte en el mecanismo de liberación, el dispositivo se retrae automáticamente y está listo para el próximo uso. En algunos países, donde el uso de soportes de uso múltiple no está prohibido por ley, en teoría se puede utilizar aproximadamente hasta 100 veces.

FORMA DE PRESENTACION:

Bolsa de 10 unidades.

PROCEDENCIA:

AUSTRIA