

FICHA TECNICA
PORTATUBO DE ROSCA CORTO



DESCRIPCION:



Cartucho individual de polipropileno que permite asegurar la aguja para la extracción de sangre.

LIMPIEZA

Para fines de limpieza, sumerja el soporte en una solución desinfectante (por ejemplo, alcohol isopropílico) recomendada para instrumentos médicos, de acuerdo con las pautas de la solución.

INDICACIONES DE USO

1. Enhebre la aguja (en el sentido de las agujas del reloj) en el soporte. (a) Asegúrese de que la aguja esté firmemente asentada en el soporte
2. No gire demasiado la aguja ya que esto puede provocar que se afloje durante la recolección!
3. Asegúrese de que la posición de la aguja sea completamente recta. Si no está recto, no hay garantía de que la aguja permanezca firme en el soporte.
4. Proceder con la venopunción
5. Sostenga el Portatubo verticalmente cerca de un recipiente para objetos punzocortantes con la punta de la aguja apuntando hacia abajo
6. Después de la punción venosa, la aguja se libera del soporte desenroscando la aguja con el dispositivo que tienen los contenedores punzocortantes.

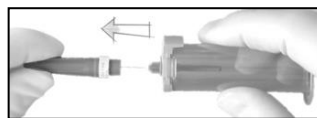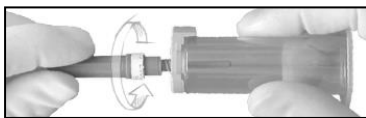

FORMA DE PRESENTACION:

Bolsa de 10 unidades.

PROCEDENCIA:

AUSTRIA