

**FICHA TECNICA**  
**TORNIQUETE CON BROCHE**



**DESCRIPCION:**

Es un torniquete de material sintético antialérgico.

**APLICACIÓN**

Se utiliza en la extracción corriente de sangre para aplicar presión sobre el brazo y facilitar la visibilidad de las venas con el fin de encontrarlas y sentirlas con mayor facilidad. Este producto sólo debería utilizarlo el personal formado con todo esmero siguiendo las instrucciones de uso.

**INDICACIONES DE USO**

1. Coloque el torniquete de 7.5 a 10 cm por encima del punto de punción.
2. Sostenga ambos extremos del torniquete y realice el nudo
3. Cuando la sangre entre en el primer tubo, simplemente tire del extremo del nudo y se soltará de inmediato.

**NOTA:**

Si se ha aplicado un torniquete durante más de 1 minuto, debe soltarse y volver aplicarse tras 2 minutos.

**ALMACENAMIENTO:**

- Evite la exposición directa a la luz solar
- Temperatura de almacenamiento: 4-25 °C

**PRECAUCIONES:**

- No aplique presiones elevadas que puedan afectar al flujo sanguíneo arterial de la extremidad.
- Retire el torniquete una vez que la sangre empiece a entrar en el primer tubo.
- Una estasis demasiado prolongada y elevada puede provocar una hemólisis.
- No lo use si la piel está agrietada.

**FORMA DE PRESENTACION:**

Unidad en empaque individual

**PROCEDENCIA:**

AUSTRIA